

Descrizione

Dispositivo studiato per agevolare il chirurgo nella raccolta del grasso durante gli interventi di lipofilling.

Utilizzo

Durante gli interventi di lipofilling il grasso viene aspirato per mezzo di una sottile cannula da una determinata zona del corpo (interno ginocchio, piega glutea, fianchi, ecc.). Il grasso prelevato viene opportunamente trattato in modo da liberarlo dalle impurità; per questa procedura si ricorre ad una speciale centrifuga ad alta velocità. Il grasso viene quindi inoculato con una microsiringa nelle zone precedentemente stabilite, distribuendosi e svolgendo così la sua azione di riempimento. Il LIPOVAC, posto in serie al circuito di aspirazione, consente la connessione diretta alle cannule utilizzate per l'aspirazione del grasso. Il grasso aspirato viene raccolto nel serbatoio del LIPOVAC. Una volta terminata l'aspirazione e disconnessi i tubi di aspirazione, il grasso può essere riversato con estrema facilità direttamente nelle provette utilizzate nella centrifuga. Questa operazione si svolge con procedura estremamente igienica e sicura non dovendo nemmeno aprire il serbatoio del LIPOVAC; il grasso può fuoriuscire infatti dal connettore laterale del serbatoio con precisione e semplicità.

Specifiche

- Il coperchio ed il contenitore sono realizzati in ABS (Styrene butadiene copolimero)
- Coperchio dotato di aggancio Fastlock
- Nervature sulla superficie garantiscono una buona presa anche con le mani bagnate
- Il tubo di connessione in silicone flessibile di lunghezza 75cm., diametro interno 7,9mm. e diametro esterno 12,7mm. permette notevole maneggevolezza
- Capacità effettiva del contenitore 200ml.
- Confezionamento in doppia busta Peel, carta medica accoppiata PET-PE
- Sterilizzato a raggi gamma


Revisione del 07.07.2010



CLASSE IIa

REGOLA 2

STERILE R

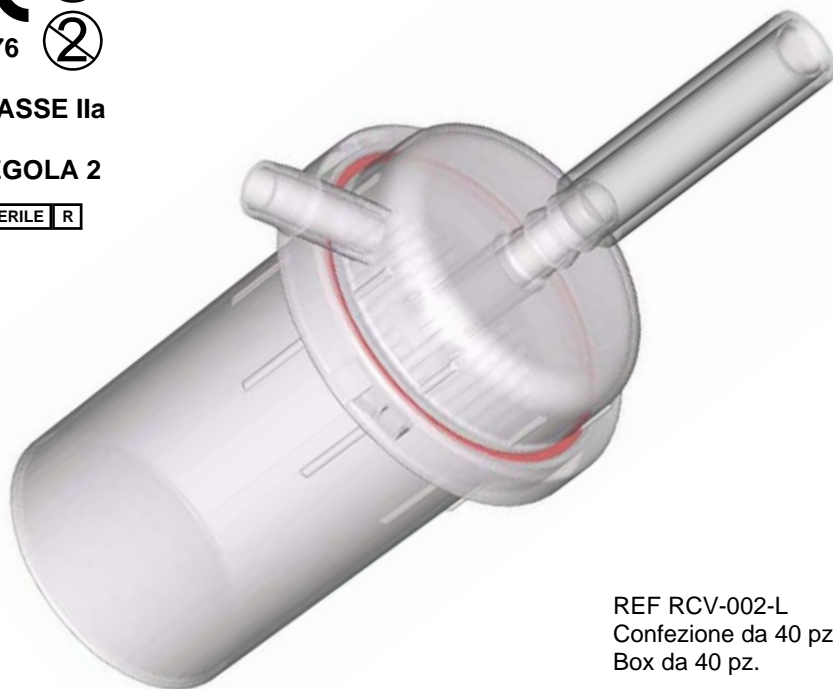

REF RCV-002-L
Confezione da 40 pz.
Box da 40 pz.



Chirurgia

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

