

Spiral Drain - Catetere di drenaggio in PVC senza e con ago-guida

Scopo

Per il drenaggio postoperatorio delle secrezioni delle ferite.

Caratteristiche

Trocar

- monouso, elimina i rischi di infezioni crociate
- la connessione con il drenaggio è priva di dislivelli al fine di minimizzare i danni ai tessuti

Catetere drenaggio

- realizzato in PVC morbido simile al silicone, riduce radicalmente la traumaticità sui tessuti
- I fori ovali disposti a spirale senza nessun foro in opposizione rendono il drenaggio molto più resistente alla trazione ed incrementano l'efficacia del drenaggio stesso riducendo allo stesso tempo il rischio di "invaginamento" dei tessuti
- dotato di tacca radiopaca per la verifica della posizione ai raggi X
- Incluso nella confezione raccordo rigido in policarbonato dedicato
- non collabisce

Specifiche

Catetere di drenaggio

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza drenaggio 650 mm.
Lunghezza di perforazione 150 mm.
Invasivo
Non contiene lattice

Ago-guida

Acciaio pieno

Confezione doppia busta tipo "PEEL"
Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)




Revisione del 17.09.2010



CLASSE IIa
REGOLA 7



NOTA: lo Spiral Drain senza ago guida può eventualmente essere abbinato agli aghi di trasfissione in acciaio riutilizzabile SIM NEEDLE

 CODICI	Diametro interno/esterno mm.									
	1.6/2.7 CH 08 CODICE	2.0/3.3 CH 10 CODICE	2.2/4.0 CH 12 CODICE	2.4/4.7 CH 14 CODICE	3.0/5.6 CH 16 CODICE	3.5/6.0 CH 18 CODICE	4.3/6.6 CH 20 CODICE	5.3/7.9 CH 24 CODICE	6.3/9.2 CH 28 CODICE	
Spiral Drain senza ago guida	4002118X* Box 120 Shore A73	4002318X* Box 120 Shore A73	40027118X* Box 120 Shore A63	4003118X* Box 120 Shore A63	4004518X* Box 120 Shore A63	4004718X* Box 120 Shore A63	4004918X* Box 120 Shore A63	4005118X* Box 120 Shore A63	4005318X* Box 120 Shore A63	
Spiral Drain con ago guida in acciaio pieno		4006118X* Box 120 Shore A73	4019218X* Box 120 Shore A73	4019618X* Box 120 Shore A73	4019318X* Box 120 Shore A73	4006518X* Box 120 Shore A73				
Connettore rigido adatto alla connessione dello Spiral Drain con l' UNOVAC	Non necessario	Non necessario		CONN50S	CONN50M	CONN50M				

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Drenaggi

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it