

Ciambella in gomma con fodera



Utilizzabile, esclusivamente quando prescritto dal medico curante, nei seguenti casi: dopo intervento di emmoroidectomia, lunghe permanenze a letto su comode.



CLASSE I
REGOLA 1



Revisione del 13.10.2009

Composizione Ciambella: Gomma, acciaio.
Fodera di cotone in dotazione.

Utilizzo, manutenzione e conservazione:

Prima dell'uso consultare il medico specialista; Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo sia in buono stato, privo di crepe, pieghe e fori.

1. Avendo cura di chiudere accuratamente la valvola di gonfiaggio eseguire un'accurata pulizia della superficie esterna del dispositivo usando acqua tiepida e sapone neutro;
2. Procedere ad un moderato gonfiaggio. Un gonfiaggio eccessivo può causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili;
3. Durante l'uso è consigliabile ricoprire la ciambella con la foderina di cotone in dotazione;
4. Dopo l'uso eseguire un'accurata pulizia e conservare il dispositivo a temperatura ambiente, sgonfio, privo di piegature, al riparo dalla polvere, dalla luce e lontano da fonti di calore;
5. Per la pulizia non usare prodotti abrasivi né detersivi (per es.: solventi, acidi, alcool, ecc.) che potrebbero danneggiare il dispositivo, ma solo acqua tiepida e sapone neutro;
6. Asciugare con cura tutta la superficie, in particolare la valvola di gonfiaggio.

Avvertenze e controindicazioni:

Non utilizzare a diretto contatto con la cute e/o su superfici lese e compromesse, utilizzare la fodera in dotazione;

Non piegare né durante né dopo l'uso;

Evitare il contatto con oggetti taglienti e/o pungenti o, in generale, con oggetti appuntiti e spigolosi;

Evitare il contatto con fuoco e/o oggetti incandescenti;

Non riempire con liquidi o altre sostanze;

Bambini al di sotto dei 12 anni, persone inabili o portatori di handicap non possono utilizzare da soli il dispositivo, ma devono essere assistiti/controllati da altre persone;

Se il dispositivo risulta danneggiato o compromesso, sostituirlo;

Ogni uso diverso da quello descritto è da considerarsi improprio.

Modalità di smaltimento: In caso di smaltimento verificarne le modalità secondo la normativa vigente.

CIAMBELLA IN GOMMA
CON FODERA
Ø cm. 40
Cod. 939135416

CIAMBELLA IN GOMMA
CON FODERA
Ø cm. 43
Cod. 939132142

Prodotti
vari

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it