


Coperta isotermitica oro/argento

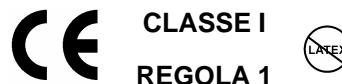

INDICAZIONI D'USO:

LA COPERTA ISOTERMICA È UN DISPOSITIVO MEDICO CON LA FUNZIONE DI ISOLARE TERMICAMENTE DAL FREDDO O DAL CALDO. ESSA VIENE UTILIZZATA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (COME PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI) O DI PRONTO SOCCORSO DI USTIONATI E/O TRAUMATIZZATI, POICHÉ HA LA FUNZIONE DI ISOLARE TERMICAMENTE L'INFORTUNATO IN FUNZIONE DEL LATO ESTERNO UTILIZZATO.



CARATTERISTICHE: Il rivestimento di alluminio (lato argento) e di alluminio dorato (lato oro) della coperta ha proprietà di riflessione che ne permettono il duplice scopo di protezione/isolamento dal caldo o dal freddo, in funzione di come viene posizionata sul corpo dell'infortunato. Infatti, se la coperta è posizionata con il lato argento a contatto con il corpo ed il lato oro esterno conserva circa l'80% del calore corporeo (protezione dal freddo), mentre se è posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo ed il lato argento esterno riflette i raggi solari permettendo al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).

Misure: cm.160x210 .

ISTRUZIONI PER L'USO: Stendere la coperta sul corpo senza stringere. Posizionare il lato oro esternamente per trattenere il calore (protezione dal freddo) oppure posizionare il lato argento esternamente per riflettere i raggi solari (protezione dal caldo).

MATERIALE: Il prodotto è costituito da un foglio di poliestere metallizzato, rivestito da un lato di alluminio e dall'altro di alluminio dorato, le cui proprietà di riflessione ne consentono la duplice funzione.

CONFEZIONE: La coperta isotermitica è contenuta, ripiegata, in un sacchetto di polietilene trasparente termosaldato. Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso in cinque lingue (compreso l'italiano) e chiare illustrazioni esplicative su possibili utilizzi.

SMALTIMENTO: Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Codice
909411581

Prodotti
vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it