

# Farmabed - Telo impermeabile salvamaterasso



Per la protezione del materasso nei casi di incontinenza di adulti e bambini. Prodotto in cotone e PVC spalmato.

Inseribile tra la parte superiore del materasso ed il lenzuolo inferiore.

Munito di occhielli.

Lavabile e disinfettabile a freddo usando prodotti liquidi specifici.



Revisione del 08.02.2010

**Cod. 939226419** - (misura cm. 50 x 70)

**Cod. 939226433** - (misura cm. 90 x 140)

**Cod. 939226421** - (misura cm. 130 x 140)



## Istruzioni:

Stendere il telo con la parte impermeabile rivolta verso il materasso. (Superficie in cotone rivolta verso l'esterno).

## Lavaggio:

Per una sua maggiore durata lavare il dispositivo a mano oppure in lavatrice usando il ciclo delicato (60 °C). Usare detersivi consigliati per capi delicati. Stirare esclusivamente sulla superficie cotone a basse temperature facendo attenzione di seguire bene i bordi per evitare arricciature. Non candeggiare. Asciugare all'ombra e comunque lontano da fonti di calore.

## Stoccaggio:

Quando non è più necessario l'utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie

## Composizione:

PVC 50% - Cotone 50%

**Prodotti  
vari**

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: [info@simitalia.it](mailto:info@simitalia.it) WEB: [www.simitalia.it](http://www.simitalia.it)