

Gomitiera/Talloniera in poliesteri - 2 pezzi

Prevenzione delle piaghe da decubito ai gomiti e talloni nei pazienti lungo degenti a rischi.

Munite di disco supplementare per aumentarne l'efficienza.

Chiusura in velcro regolabile.

Dispositivo medico non sterile.



Revisione del 13.10.2009

Composizione:
poliesteri 100%.

Istruzioni per l'utilizzo:

Indossare la gomitiera/talloniera fissandola con l'apposita chiusura in velcro. Per aumentarne l'efficienza, è possibile posizionare il disco supplementare (fornito in dotazione) in corrispondenza del punto critico di appoggio.

Indicazioni di lavaggio e conservazione:

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro.
Non stirare. Asciugare lontano da fonti di calore.



Avvertenze e controindicazioni:


Seguire le indicazioni del Medico curante.
Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.
Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.
Sostituire il prodotto quando il vello risulta consumato.

Modalità di smaltimento:

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE

909068405 box da 2pz.

CE CLASSE I
REGOLA 1 

Prodotti
vari

Distribuito da:


Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it