

Guanti in filo di cotone FR

Indicazioni d'uso:

Guanti in cotone per uso sanitario. Possono essere utilizzati sia autonomamente, sia come sottoguanti per guanti in lattice per chirurgia.

Modalità d'uso:

Prima dell'utilizzo, sottoporre il dispositivo a un ciclo di lavaggio.

Scegliere la misura dei guanti che meglio calza alle dimensioni della mano dell'utilizzatore.

Guanti di dimensioni non adeguate possono limitare la manualità dell'utilizzatore.

Se correttamente utilizzato e lavato, il guanto non ha limiti di vita, se non quelli derivanti dalla normale usura.

Avvertenze:

Non si conoscono effetti collaterali o controindicazioni all'uso dei guanti in filo di cotone utilizzati a contatto con la pelle integra.

Conservazione:

Il prodotto risulta inalterabile se è conservato nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce solare diretta.

Smaltimento: Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Disponibili a paio in 6 diverse misure.



Revisione del 20.05.2010

Materia prima	Filo di cotone 100% doppio filo
Colore	Bianco
Caratteristiche tecniche	Ambidestri - Non impermeabili - Riutilizzabili - Senza cuciture
Dimensioni	Polsino elasticizzato lungo 55 mm. Lunghezza totale 225 mm. (+/-5) (mis. 7½)
Stato del prodotto	Non sterile
Modalità di lavaggio	Lavare in acqua tiepida a 30°C con detersivo per capi delicati. Non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.
Modalità di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none">• In ambiente fresco e asciutto• Non esporre alla luce solare• Non esporre alla polvere
Confezionamento	<ul style="list-style-type: none">• Un paio in busta di polietilene trasparente per uso alimentare• 50 buste per scatola

Cod. 905301192 - Misura 6 ½

Cod. 905301216 - Misura 7

Cod. 905301228 - Misura 7 ½

Cod. 905301230 - Misura 8

Cod. 905301242 - Misura 8 ½

Cod. 905301267 - Misura 9



CLASSE I
REGOLA 1



**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it