

Manopola Saponata Monouso

Per il lavaggio della pelle



Revisione del 16.03.2011

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Manopola di spugna presaponata monouso per il lavaggio della pelle.

Costituita da un lato in TNT ed un lato in spugna impregnata di sapone a pH neutro 5.5, cuciti insieme con filo di poliestere.

Dimensioni: cm. 15,5 x 20 – Peso: 60 gr./m²

Disponibile in Conf. da 20 pz. o in Conf. da 1000 pz.

INDICAZIONE D'USO: Detersione della pelle e facilitare l'igiene personale di pazienti allettati e/o parzialmente immobilizzati. Utilizzabile sia in ambito domiciliare che ospedaliero.

ISTRUZIONI D'USO: Inserire la mano all'interno della manopola, nell'apposita tasca. Inumidire leggermente il lato di spugna e premerlo una o due volte fino ad ottenere la schiuma desiderata. Applicare direttamente sulla pelle e procedere al lavaggio. Asciugare senza risciacquare lasciando la pelle asciutta e pulita.

CONSERVAZIONE: Conservare correttamente confezionato al riparo da umidità ed a temperatura ambiente. Non esporre il prodotto direttamente alla luce.

AVVERTENZE: Non utilizzare sulla pelle lesa o irritata, né sugli occhi – Non ingerire – Utilizzare una sola volta per un solo paziente - Non utilizzare su bambini di età inferiore ai 2 anni – Se il prodotto viene a contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua in caso di irritazione e se il bruciore persiste consultare il Medico – In caso di ingestione consultare il Medico – Tenere lontano dalla portata dei bambini – Utilizzare preferibilmente entro la data indicata - Smaltire secondo le normative vigenti.

Codice
902091368 CONFEZIONE DA 20 PZ.
FR1000 CONFEZIONE DA 1000 PZ.



Prodotti
vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it