


# Reggibraccio



Consente l'immobilizzazione in posizione corretta del braccio nei casi di slogature, traumi ed ingessature.

Dotato di imbottitura per l'appoggio della mano (solo modelli rinforzati).

Dispositivo medico non sterile.

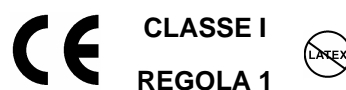

Revisione del 13.10.2009

## Composizione:

Composizione: tessuto cotone 100%, rinforzo e patta in schiuma di poliuretano, cinghie in poliestere 100%.

## Istruzioni per l'utilizzo:

- 1) Posizionare l'avambraccio all'interno del reggibraccio
- 2) Regolare la lunghezza della bretella
- 3) Allacciare tramite l'apposita chiusura a scatto

## Indicazioni di lavaggio e conservazione:

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro.  
Non strizzare. Asciugare lontano da fonti di calore.



## Controindicazioni e iterazioni:

Seguire le indicazioni del Medico curante.  
Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.  
Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.

**Eventuale tossicità dichiarata:** nessuna.

## Modalità di smaltimento:

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE	MISURA	MODELLO
909810412	MEDIA	SEMPLICE
909810501	GRANDE	SEMPLICE

CODICE	MISURA	MODELLO
909819132	MEDIA	RINFORZATO
909819221	GRANDE	RINFORZATO

**Prodotti  
vari**

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it