

Vello antidecubito sintetico



Indicato per persone anziane con ridotta mobilità, pazienti con handicap e per tutti coloro che trascorrono lunghi periodi a letto o seduti.

REF 909068518 – misura cm. 50 x 70


REF 909068520 – misura cm. 100 x 70

Caratteristiche:

- offre un morbido sostegno grazie alle fibre in poliestere 100%, alte 2 cm., che permettono il passaggio d'aria tra la cute e la superficie d'appoggio, favorendo l'evaporazione del sudore.
- previene la formazione delle piaghe da decubito ed è coadiuvante nella cura laddove le piaghe sono già esistenti.
- unico tra i prodotti disponibili sul mercato, ha una base particolarmente morbida che fornisce il necessario sostegno senza causare un irrigidimento sopra le superfici di appoggio quali il letto, la sedia o la carrozzella.

Composizione:

Poliestere 100%.

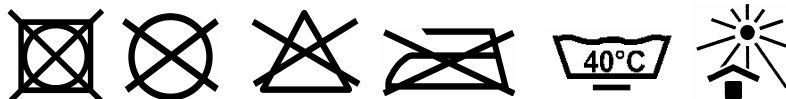

Istruzioni per l'utilizzo:

Appoggiare il vello sopra il letto, sedia o carrozzella, assicurandosi che sia ben steso e senza pieghe. E' consigliabile interporre un lenzuolo tra il paziente ed il vello; il prodotto può comunque venire a diretto contatto con la pelle, purché integra e senza alcuna lesione. Particolarmente indicato in corrispondenza delle prominenze ossee. E' inoltre estremamente indicato per tutti i pazienti costretti a lunghi periodi di immobilità.

Manutenzione e precauzioni d'utilizzo:

Per una sua maggiore durata, il dispositivo deve essere lavato a mano oppure in lavatrice usando il ciclo delicato (40 ° C). Usare detersivi consigliati per capi delicati. Non strizzare né stirare. Asciugare all'ombra e comunque lontano da fonti di calore.

Conservazione e manipolazione del dispositivo:

Quando non è più necessario l'utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie impermeabile prima di procedere alla piegatura. (Non arrotolare).

Controindicazioni e iterazioni:

Se segnalate dal Medico curante.

Eventuale tossicità dichiarata: nessuna.

Modalità di smaltimento:

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.



CLASSE I
REGOLA 1



Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

Prodotti
vari