


Ciambella in gomma latex free

Scopo

Utilizzabile, esclusivamente quando prescritto dal medico curante, nei seguenti casi: dopo intervento di emorroidectomia, lunghe permanenze a letto su comode.

Composizione

Gomma, acciaio, plastica.

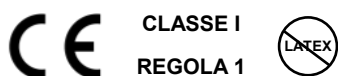

Utilizzo, manutenzione e conservazione

- Prima dell'uso consultare il medico specialista.
- Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo sia in buono stato, privo di crepe, pieghe e fori.
- Avendo cura di chiudere accuratamente la valvola di gonfiaggio eseguire un'accurata pulizia della superficie esterna del dispositivo usando acqua tiepida e sapone neutro.
- Procedere ad un moderato gonfiaggio. Un gonfiaggio eccessivo può causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili.
- Per il gonfiaggio è possibile utilizzare l'apposita pompetta (cod. 937414706) non inclusa nella confezione, ma fornibile a richiesta.
- Durante l'uso è consigliabile ricoprire la ciambella con la foderina di cotone in dotazione.
- Dopo l'uso eseguire un'accurata pulizia e conservare il dispositivo a temperatura ambiente, sgonfio, privo di piegature, al riparo dalla polvere, dalla luce e lontano da fonti di calore.
- Per la pulizia non usare prodotti abrasivi né detersivi (per es.: solventi, acidi, alcool, ecc.) che potrebbero danneggiare il dispositivo, ma solo acqua tiepida e sapone neutro.
- Asciugare con cura tutta la superficie, in particolare la valvola di gonfiaggio.

Avvertenze e controindicazioni

- Non utilizzare a diretto contatto con la cute e/o su superfici lese e compromesse, utilizzare la fodera in dotazione.
- Non piegare né durante né dopo l'uso.
- Evitare il contatto con oggetti taglienti e/o pungenti o, in generale, con oggetti appuntiti e spigolosi.
- Evitare il contatto con fuoco e/o oggetti incandescenti.
- Non riempire con liquidi o altre sostanze.
- Bambini al di sotto dei 12 anni, persone inabili o portatori di handicap non possono utilizzare da soli il dispositivo, ma devono essere assistiti/controllati da altre persone.
- Se il dispositivo risulta danneggiato o compromesso, sostituirlo.
- Ogni uso diverso da quello descritto è da considerarsi improprio.

Modalità di smaltimento

In caso di smaltimento verificarne le modalità secondo la normativa vigente.

Codici

- 901794370** Ciambella in gomma latex free Ø 40 cm
- 901794382** Ciambella in gomma latex free Ø 43 cm
- 937414706** Pompetta gonfia ciambella in gomma



Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

181

Revisione del 15.06.2018