

Farmabed - telo impermeabile salvamaterasso



Per la protezione del materasso nei casi di incontinenza di adulti e bambini.

Prodotto in cotone e PVC spalmato.

Inseribile tra la parte superiore del materasso ed il lenzuolo inferiore.

Munito di occhielli.

Lavabile e disinfettabile a freddo usando prodotti liquidi specifici.

Codici

939226419 - misura 50 x 70 cm

939226433 - misura 90 x 140 cm

939226421 - misura 130 x 140 cm

Istruzioni

Stendere il telo con la parte impermeabile rivolta verso il materasso, superficie in cotone rivolta verso l'esterno.

Lavaggio

Per una sua maggiore durata lavare il dispositivo a mano oppure in lavatrice usando il ciclo delicato (60 °C).

Usare detersivi consigliati per capi delicati.

Stirare esclusivamente sulla superficie cotone a basse temperature facendo attenzione di seguire bene i bordi per evitare arricciature.

Non candeggiare.

Asciugare all'ombra e comunque lontano da fonti di calore.



Stoccaggio

Quando non è più necessario l'utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie.

Composizione

PVC 50%

Cotone 50%

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

200

Revisione del 02.08.2017