

Gomitiera / talloniere in poliester

Prevenzione delle piaghe da decubito ai gomiti e talloni nei pazienti lungo degenti a rischi.

Munite di disco supplementare per aumentarne l'efficienza.

Chiusura in velcro regolabile.

Dispositivo medico non sterile.

Composizione

Poliester 100%.

Istruzioni per l'utilizzo

Indossare la gomitiera / talloniera fissandola con l'apposita chiusura in velcro. Per aumentarne l'efficienza, è possibile posizionare il disco supplementare (fornito in dotazione) in corrispondenza del punto critico di appoggio.

Indicazioni di lavaggio e conservazione

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro.

Non stirare. Asciugare lontano da fonti di calore.



Avvertenze e controindicazioni

- Seguire le indicazioni del Medico curante.
- Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.
- Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.
- Sostituire il prodotto quando il vello risulta consumato.

Modalità di smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Codice

909068405 Box da 2 pz.



CLASSE I
REGOLA 1

