

# Laccio emostatico tubolare in silicone

## Caratteristiche

- Prodotto in puro silicone "medical grade".
- Idrorepellente.
- Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate.

## Specifiche

- Non sterile.
- Lunghezza: 50 cm.
- Diametro interno 7 mm, diametro esterno 8 mm.
- Prodotto in silicone "medical grade" SH 60.
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Confezionati singolarmente in busta minigrup di polietilene.
- Unità di vendita: scatola da 20 pezzi.
- Non contiene lattice.



CLASSE I  
REGOLA 1



## Codice

**EMOSIL50** Scatola da 20 pz.  
CND V9003  
RDM 32819/R

## Indicazioni per l'uso

- Sterilizzabile in autoclave a 121 °C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Il mancato rispetto delle modalità di sterilizzazione o un uso improprio del prodotto potrebbero determinarne l'alterazione delle proprietà di resistenza meccanica.
- La durata del prodotto dipende dalle condizioni di uso, conservazione e sterilizzazione.
- Non applicare a contatto con tessuti lesi o ferite aperte.
- Non utilizzare il prodotto se non integro.

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

146

Revisione del 04.11.2019