

# Manopola saponata monouso

## Per il lavaggio della pelle



### Caratteristiche tecniche:

Manopola di spugna presaponata monouso per il lavaggio della pelle.  
 Costituita da un lato in TNT ed un lato in spugna impregnata di sapone a pH neutro 5,5, cuciti insieme con filo di poliestere.  
 Dimensioni: 15,5 x 20 cm – peso: 60 gr/m<sup>2</sup>.  
 Disponibile in conf. da 20 pz. o in conf. da 1000 pz.

### Indicazione d'uso

Detersione della pelle e facilitare l'igiene personale di pazienti allettati e/o parzialmente immobilizzati. Utilizzabile sia in ambito domiciliare che ospedaliero.

### Istruzioni d'uso

Inserire la mano all'interno della manopola, nell'apposita tasca.  
 Inumidire leggermente il lato di spugna e premerlo una o due volte fino ad ottenere la schiuma desiderata.  
 Applicare direttamente sulla pelle e procedere al lavaggio.  
 Asciugare senza risciacquare lasciando la pelle asciutta e pulita.

### Conservazione

Conservare correttamente confezionato al riparo da umidità ed a temperatura ambiente.  
 Non esporre il prodotto direttamente alla luce.

### Avvertenze

- Non utilizzare sulla pelle lesa o irritata, né sugli occhi.
- Non ingerire.
- Utilizzare una sola volta per un solo paziente.
- Non utilizzare su bambini di età inferiore ai 2 anni.
- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua; in caso di irritazione e se il bruciore persiste consultare il Medico.
- In caso di ingestione consultare il Medico.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare preferibilmente entro la data indicata.
- Smaltire secondo le normative vigenti.

### Codici

**902091368** Confezione da 20 pz.  
**FR1000** Confezione da 1000 pz.

Distribuito da:



Società certificata  
 UNI EN ISO 13485:2016  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it