


# NGHold - fermacatetere nasogastrico

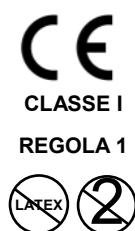

## Scopo

Per trattenere la sonda nasogastrica in modo semplice ed efficace, proteggendo la pelle del paziente ed agevolando il lavoro del Personale Sanitario.

## Caratteristiche

- L'astina fermacatetere prodotta in nylon di colore bianco è regolabile a piacere dall'operatore in modo da trattenere e mantenere nella corretta posizione la sonda nasogastrica.
- Facile e veloce da applicare, dopo aver deterso la pelle, è sufficiente staccare il velo di carta protettiva presente sul foam adesivo in espanso polivinilico e applicare il prodotto sul naso del paziente (vedi figura).
- Applicabile anche indossando guanti medicali grazie al comodo invito di cui è dotato.
- Estremamente confortevole per il paziente grazie:
  - al morbido foam in PVC di colore bianco spessore 10/10 con il quale è prodotto
  - al supporto di alluminio spessore 4 micron che permette al foam di adattarsi alle forme anatomiche del paziente
  - all'adesivo a base acquosa
- Sia il foam che l'elemento adesivo sono atossici e riducono il rischio di irritazioni della cute.
- Protegge la sonda nasogastrica da eventuali strozzature in corrispondenza del ritenitore.
- Consente una completa visione del punto di introduzione della sonda nasogastrica, la quale risulta essere libera da elementi di nastro adesivo.
- Conveniente per il personale paramedico.
- Una volta rimosso l'NGHold, la patina adesiva che rimane sulla cute del paziente può facilmente essere asportata utilizzando una spugnetta imbevuta di acqua tiepida saponata.
- Non contiene lattice.
- Non invasivo.
- Non sterile.

## Codici

- CH100** Misura prematuri / neonati - per catetere CH 06, 09 (confezione da 100 pezzi)  
**CH200** Misura adulti / ragazzi - per catetere CH 10, 12, 14, 16, 18 (confezione da 100 pezzi)