

Reggibraccio



Consente l'immobilizzazione in posizione corretta del braccio nei casi di slogature, traumi ed ingessature.

Dotato di imbottitura per l'appoggio della mano (solo modelli rinforzati).

Dispositivo medico non sterile.

Composizione

Tessuto cotone 100%, rinforzo e patta in schiuma di poliuretano, cinghie in poliestere 100%.

Indicazioni di lavaggio e conservazione

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro.

Non strizzare.

Asciugare lontano da fonti di calore.



Istruzioni per l'utilizzo

- Posizionare l'avambraccio all'interno del reggibraccio.
- Regolare la lunghezza della bretella.
- Allacciare tramite l'apposita chiusura a scatto.

Controindicazioni e iterazioni

- Seguire le indicazioni del Medico curante.
- Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.
- Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.


Eventuale tossicità dichiarata

Nessuna.

Modalità di smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE	MISURA	MODELLO
909810412	Media	Semplice
909810501	Grande	Semplice
909819132	Media	Rinforzato
909819221	Grande	Rinforzato

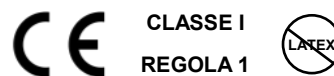

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

185

Revisione del 15.06.2018