

# Vello antidecubito sintetico




Indicato per persone anziane con ridotta mobilità, pazienti con handicap e per tutti coloro che trascorrono lunghi periodi a letto o seduti.

## Codici

**909068518** – misura 50 x 70 cm

**909068520** – misura 100 x 70 cm

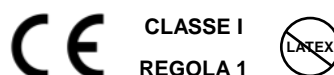

## Caratteristiche

- Offre un morbido sostegno grazie alle fibre in poliestere 100%, alte 2 cm, che permettono il passaggio d'aria tra la cute e la superficie d'appoggio, favorendo l'evaporazione del sudore.
- Previene la formazione delle piaghe da decubito ed è coadiuvante nella cura laddove le piaghe sono già esistenti.
- Unico tra i prodotti disponibili sul mercato, ha una base particolarmente morbida che fornisce il necessario sostegno senza causare un irrigidimento sopra le superfici di appoggio quali il letto, la sedia o la carrozzella.

## Composizione

Poliestere 100%.

## Istruzioni per l'utilizzo

Appoggiare il vello sopra il letto, sedia o carrozzella, assicurandosi che sia ben steso e senza pieghe.

E' consigliabile interporre un lenzuolo tra il paziente ed il vello; il prodotto può comunque venire a diretto contatto con la pelle, purché integra e senza alcuna lesione.

Particolarmente indicato in corrispondenza delle prominenze ossee.

E' inoltre estremamente indicato per tutti i pazienti costretti a lunghi periodi di immobilità.

## Manutenzione e precauzioni d'utilizzo

Per una sua maggiore durata, il dispositivo deve essere lavato a mano oppure in lavatrice usando il ciclo delicato (40 °C).

Usare detersivi consigliati per capi delicati.

Non strizzare né stirare.

Asciugare all'ombra e comunque lontano da fonti di calore.

## Conservazione e manipolazione del dispositivo

Quando non è più necessario l'utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie impermeabile prima di procedere alla piegatura. Non arrotolare.

## Controindicazioni e iterazioni

Se segnalate dal Medico curante.

## Eventuale tossicità dichiarata

Nessuna.

## Modalità di smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.



Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

201

Revisione del 02.08.2017