

Contenitori di sicurezza ecologici

Scopo

Contenitori di sicurezza ecologici con disco a strappo per aghi, siringhe, bisturi usati.

Caratteristiche

Le pareti dei contenitori di sicurezza, così come il loro doppio coperchio a sigillo garantito, assicurano contro il rischio di perforazione o perdite di liquidi di scarto e consentono un trasporto sicuro all'inceneritore per rifiuti.

I contenitori di sicurezza sono di color giallo vivo e con diciture in rilievo.

Specifiche

Ogni contenitore è fornito di un originale disco a strappo interno collocato nel coperchio. Ciò per evitare qualsiasi contatto con gli aghi.

I contenitori di sicurezza sono prodotti in polipropilene.

Il sistema di chiusura del tappo posto nel coperchio consente una chiusura provvisoria di sicurezza quando il contenitore è in fase progressiva di riempimento.

Infatti, inserendo il tappo con la superficie a diametro più stretto (lato A) nel foro del coperchio, sarà possibile aprire e chiudere più volte il contenitore.

I contenitori sono disponibili nelle seguenti misure:

2000 cc / 2 L per bisturi monouso e non, e per siringhe di capacità elevata

1500 cc / 1,5 L utilizzabili nei reparti ospedalieri e studi clinici

500 cc / 0,5 L per carrelli nei laboratori analisi, reparti, ecc.

100 cc / 0,1 L trasportabile nella valigetta o nella tasca del camice di medici e di infermieri

Il test ha dimostrato che l'imballaggio è conforme ai requisiti di prova per il tipo 1H2 secondo ADR, RID, ICAO e IMDG.

Il test viene eseguito per merci solide del gruppo di imballaggio II e III, UN 3291, classe 6.2, rifiuti clinici non specificati.

L'imballaggio ha superato un test di resistenza alla perforazione secondo la norma ISO 23907.



A riempimento completo (circa +/- 70-80%) del massimo volume del contenitore è possibile chiudere il tappo facendo sì che questo non possa più essere riaperto.

Per ottenere questa seconda funzione è necessario inserire il tappo in maniera capovolta (lato B) e cioè con la superficie a diametro maggiore rivolta verso il foro e spingendo sino in fondo.

Codice

701 da 100 cc. / 0,1 L

705 da 500 cc. / 0,5 L

715 da 1500 cc. / 1,5 L

720 da 2000 cc. / 2 L

Confezione

Minimo ordinabile 10 pezzi per misura.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016


Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

146

Revisione del 21.06.2022

SPECIFICHE

MODELLI: 705 da 500 cc, 715 da 1500 cc, 720 da 2000 cc

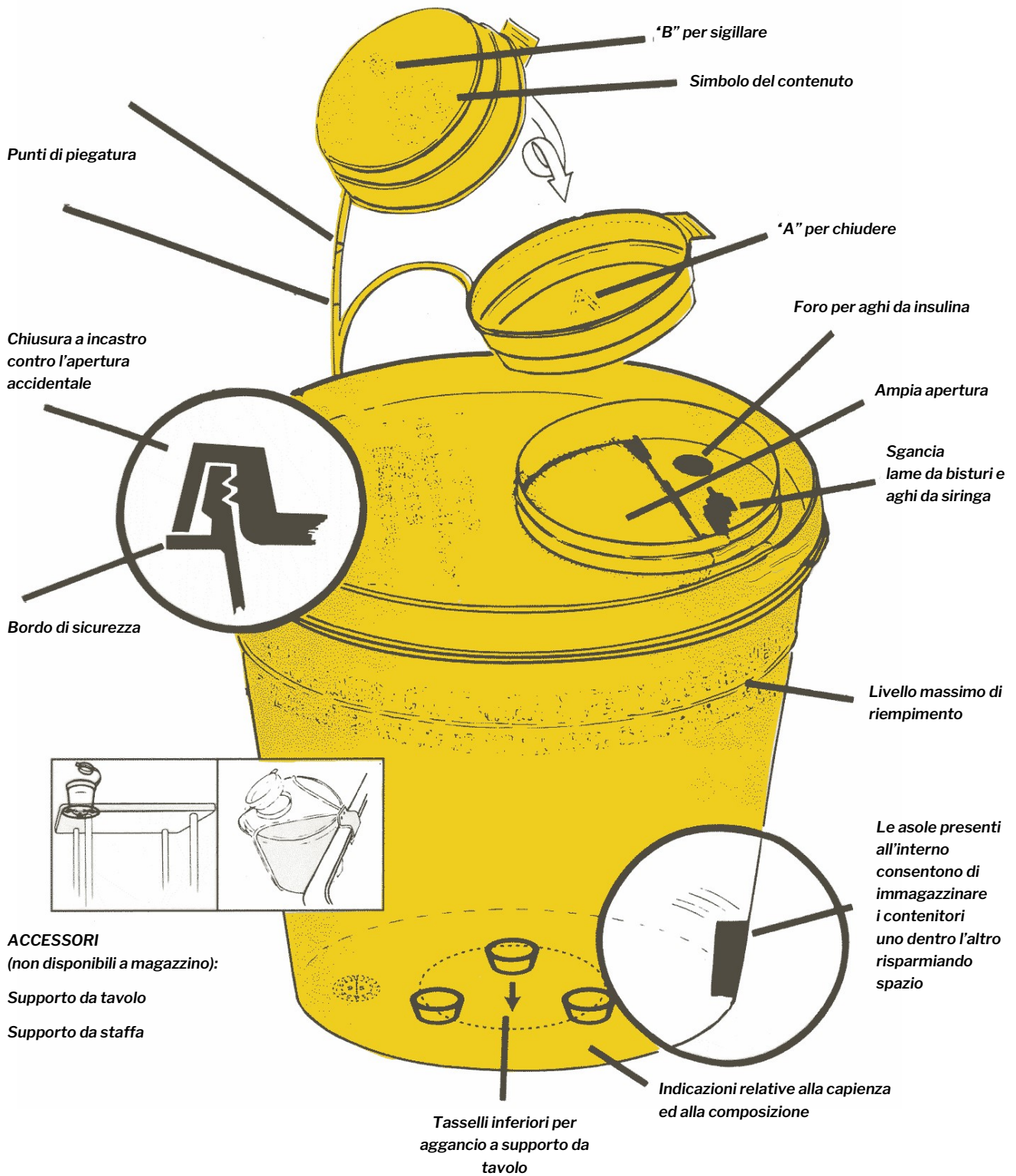

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

147

Revisione del 21.06.2022