


# Coperta isotermaica oro / argento

## Indicazioni d'uso

La coperta isotermaica è un dispositivo medico con la funzione di isolare termicamente dal freddo o dal caldo.

Essa viene utilizzata in situazioni di emergenza (come protezione dagli agenti atmosferici) o di pronto soccorso di ustionati e/o traumatizzati, poiché ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.

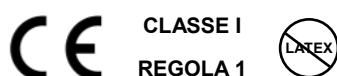

## Caratteristiche

Il rivestimento di alluminio (lato argento) e di alluminio dorato (lato oro) della coperta ha proprietà di riflessione che ne permettono il duplice scopo di protezione / isolamento dal caldo o dal freddo, in funzione di come viene posizionata sul corpo dell'infortunato. Infatti, se la coperta è posizionata con il lato argento a contatto con il corpo ed il lato oro esterno conserva circa l'80% del calore corporeo (protezione dal freddo), mentre se è posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo ed il lato argento esterno riflette i raggi solari permettendo al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).

Misure: 160 x 210 cm.

## Istruzioni per l'uso

Stendere la coperta sul corpo senza stringere.

Posizionare il lato oro esternamente per trattenere il calore (protezione dal freddo) oppure posizionare il lato argento esternamente per riflettere i raggi solari (protezione dal caldo).

## Materiale

Il prodotto è costituito da un foglio di poliestere metallizzato, rivestito da un lato di alluminio e dall'altro di alluminio dorato, le cui proprietà di riflessione ne consentono la duplice funzione.

## Confezione

La coperta isotermaica è contenuta, ripiegata, in un sacchetto di polietilene termosaldato.

Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso in cinque lingue (compreso l'italiano) e chiare illustrazioni esplicative su possibili utilizzi.

## Smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

## Codice

909411581

Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it